

『臍頭十二指腸切除術』等の縫合糸ホルダー

# アスルク™ (東北大式)

胆管-空腸吻合用(大1個) + 臍管-空腸吻合用(小3個)/セット

東北大学病院 肝胆膵外科との共同開発品で、

円弧型縫合糸整理器 = An arc type suture thread rearranging container より

ASRC アスルク(東北大式)とネーミングしました。



**特長 1. 適度なテンションで縫合糸を保持します\***  
従来のモスキート鉗子等での縫合糸保持時による過度な負荷が生じた場合の組織損傷を防ぐことができます。

**特長 2. 吻合時における縫合糸の位置決め・整理が容易になります**  
胆管-空腸吻合用(大)は、全周にスリットを設けていることにより、どの位置でも糸が絡まずに縫合糸を整理することができます。  
臍管-空腸吻合用(小)は、糸をひとまとめに整理し移動、位置の微調整を行うことができます。

**特長 3. 糸が絡まず吻合操作・補助が容易になります**  
素材を発泡スポンジにしていることにより、様々な形状の開創部にもフレキシブルにフィットします。  
スリットに縫合糸を挟み込むことにより、多数のモスキート鉗子等を使用することなく糸を整理・保持できます。\*

胆管 - 空腸吻合




開創部に合せて鉗子等で固定します。


膵管 - 空腸吻合




膵管-空腸吻合の準備・糸整理を行います。

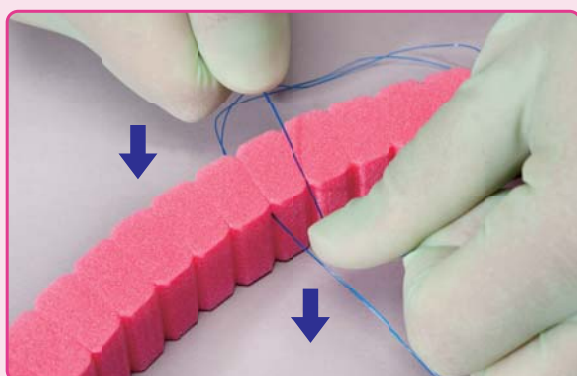


スリットに吻合用縫合糸を差し込みます。

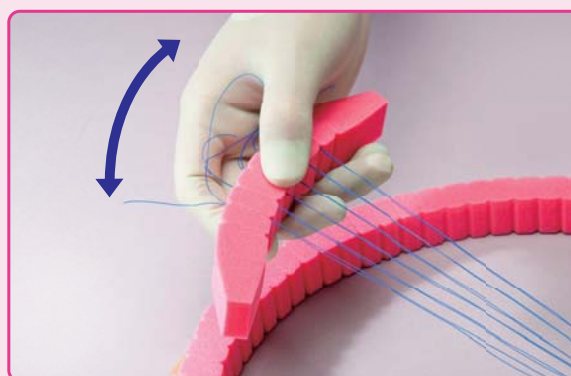

保持・整理したまま、まとめて移動できます。

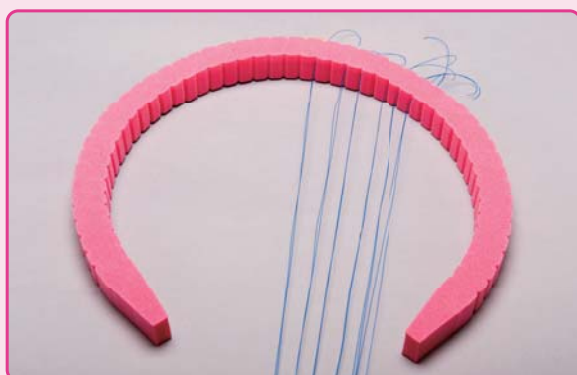

複数の糸が簡易に保持・整理できます。

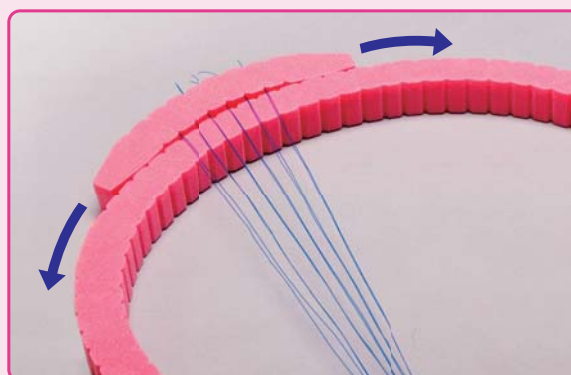

吻合操作に最適な位置へ自由に調整できます。

■アスルク™(東北大式)

滅菌済

製品記号	販売単位	備考	JANコード
ASRC-1	15セット/箱	大1個・小3個/セット	4548453854345

ご使用に際しては、必ず添付文書をご確認ください。

【禁忌・禁止】

- 再使用・再滅菌禁止

【使用上の注意】

- 本品は、縫合糸等の吻合・縫合時による縫合糸等の整理、補助用途に使用するものです。縫合糸等の保持は、通常、鉗子等を用いて行ってください。本品のみで縫合糸等の保持を行う場合は、保持具合を確認し使用上問題のないことを確認してからご使用ください。
- 本品を体内内で使用しないでください。切断断片等が体内内に進入する可能性があります。

販売名：アスルク  
 クラス分類：一般医療機器(クラス1)  
 届出番号：13B1X00061300003  
 一般的名称：縫合糸ガイド  
 素材：ポリエチレン発泡体  
 滅菌：EOG滅菌

※特許出願中 ※登録意匠第1429939号