

# 手術用グローブ装着ガイド

監修：東京医療保健大学大学院 感染制御学 教授 大久保 憲先生

## ポイント

- 1人で清潔操作を行いやすいクローズド法を紹介  
します。ここに紹介する以外にも手をガウンの袖  
から出して装着するオープン法、装着介助者を行う  
装着介助法があります。

どちらも素手では折り返されてるカフ部以外は触れ  
ないように装着することがポイントです。

## テクラップ® IIシリーズ



TechWRAP II (パウダー付)




TechWRAP II Super (パウダーフリー)

■パウダーフリーとパウダー付の2タイプがあります。  
テクラップ® IIシリーズは、袖口にしっかりフィットさせ  
るようカフを厚く・長くし、繊細な感触が要求される  
指先を薄く仕上げています。また、マイクロ粗面仕上  
げにより確実なグリップ感が得られます。  
テクラップ® IIシリーズは徹底した洗浄を行うことで、  
ラテックスアレルギー原因物質の含有量を低減させ  
ています。

## 手術用グローブ装着ガイド

**1** ガウンの袖口から手がでないようし、グローブカフ部を手前に向けて、内包材を開きます。

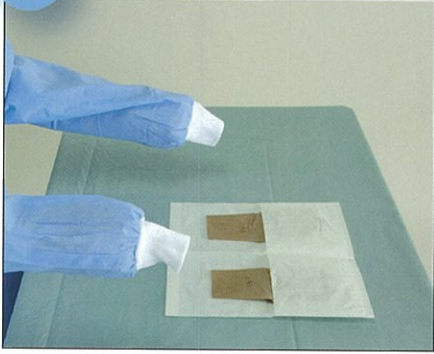

**2** 左手で右手用グローブのカフ折り返し部をつかみ、内包材から取り出します。



**3** グローブは指先を下に、親指を手前に向けます。



**4** 右手はガウンの中で、親指を上に向けます。



**5** グローブの親指と、上に向けた右手親指を合わせます。



**6** ガウン内の親指をグローブの親指に添えながら、カフ折り目部に差し入れます。



**7** カフ折り目部分をガウン内の指でつかみ、右手のひらに乗せます。



**8** 左手でグローブのカフ折り目部分をつかんで右手甲側ガウンに被せます。



**9** ガウンの袖口とグローブのカフ縁を一緒につかみ、指先を徐々にグローブに入れていきます。



**10** ピッタリとフィットするように装着します。



**11** 右手装着完了。



**12** 同じ手法かオープン法にて左手を装着します。

