

キャップ・マスク装着ガイド

監修：東京医療保健大学大学院 感染制御学 教授 大久保 憲先生

ポイント

- キャップ 頭髪の術野への落下防止が目的です。素材から髪の毛が突き抜けられないものを選択します。なるべく髪の毛を覆うように装着し、術野に覆い被さる術式では完全にカバーできるタイプを装着します。
- マスク 呼気、吸気なるべくフィルターを通るように装着することがポイントです。ノーズピースやギャザーを使って顔にフィットさせて装着します。

HOGY SURREM® Series 安心の性能と価格

メデカルキャップ



MCS-201



MSC-103P

サージカルマスク



MM-S1



MM-S6P

キャップ・マスク装着ガイド

- 1** キャップは額がでないよう深く被り、耳、襟足ができるだけ隠れるようにします。



- 2** マスクはノーズピースの中心を軽く折り、マスクの上下を広げます。



- 3** ノーズピースを両手人差し指で鼻に沿って押し当てます。



- 4** 上の紐を頭部で結びます。



- 5** ノーズピースを押さえながらマスクを広げ顎の下までカバーします。



- 6** 両頬に隙間を作らないように調整し、下の紐を頸部で結びます。



- 7** 隙間がない事を確認し、装着完了。



- 悪い例: 顔に密着させず、サイドに隙間ができています。

